

SOLUÇÃO PRÉ LIMPEZA CISA PRECLEAN

INSUMOS QUÍMICOS

APLICAÇÃO

- A solução para pré-limpeza Cisa Preclean, foi desenvolvida para utilização nos instrumentais cirúrgicos após os procedimentos, otimizando assim o processo de limpeza manual e automatizada; mantendo o material úmido e evitando o ressecamento da matéria orgânica. Além disso, possui a característica de baixa formação de espuma para não prejudicar a performance na limpeza automatizada.



(Imagem Ilustrativa)

MODELOS DO PRODUTO

Código - Descrição:

- CI-C-ZLP-.5L000** – Líquido para Pré Limpeza Cisa Preclean 500ml com borrifador Quant.: (____)

SOLUÇÃO PRÉ LIMPEZA CISA PRECLEAN

INSUMOS QUÍMICOS

DESCRIÇÃO

Este produto foi desenvolvido para auxiliar na limpeza dos instrumentais cirúrgicos após a realização dos procedimentos. Otimizar o processo de limpeza manual e automatizada, mantendo o material úmido e evitando o ressecamento da matéria orgânica. Proporcionando a remoção de sangue nos instrumentais de qualquer tipo de geometria.

NORMAS

A solução pré-limpeza Cisa Preclean é produzido de acordo com a **RDC 40/2015**.

Projetado e produzido conforme requisitos das normas de sistemas de Gestão da Qualidade **NBR ISO 9001-2015** e **NBR ISO 13485:2016**.

Este produto foi notificado na Anvisa Cisa Preclean – Solução Pré-Limpeza – sob o número de: **25351.059274/2016-21**.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Composto por Tensoativo não iônico, álcool graxo etoxilado, emulsionante, solvente, sequestrante, conservante e veículo.

Aspecto: líquido; cor: transparente; odor: característico.

Baixa formação de espuma não prejudica a performance na limpeza automatizada. O produto é levemente aromatizado e possui pH neutro.

Instruções de Uso

Borrifar o produto por toda a superfície interna e externa dos instrumentais de forma a mantê-los sempre úmidos até o processo de limpeza final. Produto pronto uso e não deve ser diluído.

Condições de armazenamento

Conservar em local fresco, ventilado e protegido do calor. Manter o produto em sua embalagem original.

Condições de transporte

Respeitar as condições de armazenamento. Transportar em embalagens fechadas e resistentes a impactos.

Prazo de validade

O produto possui validade de 24 meses, respeitando as condições de armazenamento, descritas neste documento.

Aplicação

Setores de saúde, indústrias alimentícias, laboratórios, veterinárias.

Informações Relevantes/Precauções

Antes da sua utilização, é recomendada a leitura das instruções de uso do produto.

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou a pele. Usar equipamento de proteção individual durante a manipulação do produto. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar embalagem vazia. Conservar em lugar fresco, ventilado e protegido do calor.

Apresentação do Produto

Frascos de 500ml: caixas de papelão com 10 unidades
Dimensão (LXAXP) mm – Peso unitário (Kg):
90 X 230 X 50 mm – 0,8 Kg



Disposição final

Devem ser eliminados como resíduos não perigosos. Não há necessidade de tratamento especial antes do descarte final. Tratar em conformidade com os regulamentos municipal, estadual e federal.